**PRODUCCIÓN**

Código: PR- FT01-P01

Versión: 1

**FICHA TÉCNICA TAPABOCA DESECHABLE
TERMOSELLADO**

Fecha: 02-03-2020

Pág: 1 de 1

CATEGORIA**TAPABOCA DESECHABLE TERMOSELLADO 3
CAPAS****REGISTRO INVIMA****20274****TAPABOCA
DESECHABLE 3
PLIEGUES BANDAS
CAUCHO BLANCO****CODIGO: TDT-001-3C****NOMBRE COMERCIAL: Mascarilla desechable o tapabocas****IDENTIFICACION DEL PRODUCTO****DESCRIPCIÓN**

Los tapabocas desechables termosellados 3 capas son utilizadas en áreas de la salud, hoteles, restaurantes, Industrias alimentarias, Industrias químicas y hoy en día de uso obligatorio para cualquier persona con o sin problemas respiratorios debido al COVID-19, El tapaboca desechables termosellados 3 capas protege de posibles gérmenes vía bucal o nasal.

USOS

Este producto es de uso personal, industrial, médico, laboratorio, alimentaria y personal de la belleza.

**PRESENTACIÓN
COMERCIAL**

Caja que contiene 50 unidades (con empaque individual de plástico termosellado)

ESPECIFICACIONES**COMPONENTE****FUNCION****CUERPO DEL TAPABOCA**

Compuesto de dos capas 100% PP de tela no tejida Spunbonded, 20 – 40 gsm y una capa intermedia de Meltblown como filtro 20 – 40 gsm, tres pliegues para mayor cobertura facial y funciona como sistema de protección frente a fluidos.

ELÁSTICO DE SUJECIÓN

Cada tapaboca cuenta con 2 elásticos redondos de color blanco y de ajuste seguro a la cara del individuo.

PUENTE NASAL

Ajuste a la nariz suave y liviano para una perfecta adaptabilidad y confort

FRECUENCIA DE USO

Uso único no reutilizable

DIMENSIONES Y DISEÑO

LARGO:
17.5 cm

ANCHO:
9.5 cm

Nota: La tolerancia en las dimensiones de +/- 0.5 cm


COLOR

BLANCO



AZUL



	PRODUCCIÓN	Código: PR- FT01-P01
	FICHA TÉCNICA TAPABOCA DESECHABLE TERMOSELLADO	Versión: 1
		Fecha: 02-03-2020
		Pág: 1 de 1

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Almacenar en un lugar libre de humedad y de gases cáusticos, debe ser un lugar seco y ventilado
- Almacenar en lugar limpio, fresco y libre de contaminación
- No almacenar cerca de fuentes de calor u olores.

INSTRUCCIONES DE USO	<ul style="list-style-type: none"> • Lavar las manos con agua y jabón antes de colocar y después de quitar el tapabocas. • El tapaboca debe cubrir desde el tabique de la nariz hasta la barbilla, el puente nasal va en la parte de arriba. • Colocar bandas elásticas detrás de las orejas • Ajustar puente nasal moldeando alrededor de la nariz • Cambie el tapaboca si este se humedece • No toque el tapabocas mientras lo use. Si lo hace, lávese las manos inmediatamente. • Para retirar el tapabocas hágalo de atrás hacia delante, quitando con las manos limpias las bandas elásticas. • Al finalizar lávate las manos con agua y jabón
-----------------------------	---

CUALIDADES DE PRODUCTO	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Eficiencia de filtración hasta del 95 % ✓ Alta resistencia al desgarre por su tecnología termosellado automatizado ✓ Banda elástica soldada por ultrasonido automatizada ✓ Permeable no acumula calor ni humedad ✓ Resistencia al paso de líquidos ✓ Buena opacidad, suave al tacto por su material Spunbonded ✓ Barrera microbiana
-------------------------------	---

INSCRITOS PARA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, EQUIPOS BIOMÉDICOS Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO DECLARADOS COMO VITALES NO DISPONIBLES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR EL COVID-19
CORTE AL 17 DE MAYO DE 2020

#	Nº REGISTRO	FECHA DE INSCRIPCIÓN	ENTIDAD RESPONSABLE DE LA FABRICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS DE REPRESENTANTE LEGAL O SOLICITANTE	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	PRODUCTO
830	20274	07/05/2020	CENTRAL TRUTH S.A.S	YURANI VERONICA HIDALGO JARAMILLO	CALLE 10 # 22 A 700	YUMBO	3104162278/ 3113002294	yhidalgo@centraltruth.com.co	TAPABOCA DESECHABLE

DATOS DEL FABRICANTE	CENTRAL TRUTH S.A.S
Dirección:	AV 6 A BIS # 35 N 100
Ciudad:	Cali - Valle
E-mail:	rperlaza@centraltruth.com.co
Teléfonos de contacto:	(311)3002294 / 3104162278